

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Glandomed®

Medizinische Mundspüllösung

Zusammensetzung

Die medizinische Mundspüllösung Glandomed® (500 ml) enthält:
Macrogol 300, Macrogol 1500, Natriumhydrogencarbonat, Saccharin-Natrium,
Natriumedetat, Chlorhexidindigluconat, Orangenaroma, Wasser.

Anwendungsgebiete

Zur schonenden, milden und gründlichen Reinigung des Mundes, insbesondere bei oraler Mucositis (Entzündung der Mundschleimhaut) jeder Genese.

Gegenanzeigen

Sind bisher nicht bekannt.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können allergische Reaktionen und Zahnverfärbungen auftreten.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Sind bisher keine beobachtet worden.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Glandomed® ist eine gebrauchsfertige, medizinische Mundspüllösung und wird unverdünnt angewendet.

Nach dem Essen und vor dem Schlafengehen wird der Mund sorgfältig mit ca. 20 ml Glandomed® gespült (Messbecher auf der Verschlusskappe). Glandomed® sollte dabei für 2 Minuten im Mund hin und her bewegt und anschließend ausgespuckt werden. Nicht mit Wasser nachspülen und für 15 Minuten nicht essen oder trinken.

Glandomed® kann bei Bedarf auch öfter angewendet werden.

Bei einer Mucositis oder Xerostomie (Mundtrockenheit durch verminderte Speichelbildung) ist es empfehlenswert, den Mund mit Glandomed® möglichst alle 2 Stunden und vor dem Schlafengehen zu reinigen (wie oben beschrieben).

Hinweise

Glandomed® reinigt die Mundschleimhaut, das Zahnfleisch und die Zähne. Diese medizinisch gründliche Reinigung verringert Plaquebildung und Infektionen im Mund und kann so die Beschwerden einer oralen Mucositis lindern.

Glandomed® ist besonders gut verträglich bei empfindlicher Mundschleimhaut oder oraler Mucositis, da es keinen Alkohol oder reizende Bestandteile enthält. Die speziell milden Bestandteile (Macrogole) von Glandomed® benetzen die Mundschleimhaut sehr intensiv und lösen Beläge und Verkrustungen während der Spülung.

Medizinprodukt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Flasche nach Gebrauch verschließen.

Bei erkennbarem Vorliegen von Partikeln / Kristallen in der Glandomed®-Lösung soll die Lösung nicht angewendet werden.

Bei Raumtemperatur (nicht unter 15° C) aufbewahren und vor Licht (Sonneneinstrahlung) schützen.

Das Verfallsdatum ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt.

Stand der Information

Juli 2017

STADApHarm GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel
Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-3888



9235132
1705

