



HYLO FRESH®

HYLO FRESH® Augentropfen



HYLO FRESH®: Der Frischekick für die Augen

- Erfrischt müde oder gestresste Augen
- Lindert leichte Symptome wie gelegentlich gerötete oder juckende Augen
- Mit 0,03 % Hyaluronsäure und Euphrasia
- Frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten
- Mit Kontaktlinsen verträglich

Schnelle Erfrischung und Befeuchtung gestresster Augen

Unsere Augen sind den ganzen Tag gefordert und zahlreichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Reagieren sie aufgrund von Bildschirmarbeit, Gaming, trockener Raumluft oder Kontaktlinsen müde und gereizt, spenden HYLO FRESH® befeuchtende Augentropfen neue Frische. Die Inhaltsstoffe Hyaluronsäure und Euphrasia unterstützen den natürlichen Tränenfilm, befeuchten die Augenoberfläche und lindern so Beschwerden wie Rötungen oder Juckreiz. Die Tropfen sind gut verträglich und können sowohl mit harten als auch mit weichen Kontaktlinsen verwendet werden. Das praktische COMOD® System bietet noch weitere Vorteile: Es gibt pro Pumpstoß nur 1 Tropfen aus, mit mindestens 300 Tropfen pro Flasche ist HYLO FRESH® sehr ergiebig. Auch ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und Phosphaten können die Augentropfen nach Anbruch 6 Monate verwendet werden.

Wache Augen durch Hyaluronsäure und Euphrasia

HYLO FRESH® ist der effektive Frischekick für gestresste und müde Augen. Die Augentropfen setzen auf die Kombination zweier hochwertiger Inhaltsstoffe: Die wasserbindenden Eigenschaften der Hyaluronsäure sorgen für die Bildung eines Schutzfilms auf der gereizten Augenoberfläche und damit für die Befeuchtung von Binde- und Hornhaut. In allen Augentropfen der HYLO® Produktfamilie kommt ausschließlich hochviskose, langkettige Hyaluronsäure für eine langanhaltende Befeuchtung des Auges zum Einsatz. Euphrasia, auch als Augentrost bekannt, beruhigt gestresste und gerötete Augen, die z. B. durch Zugluft, Bildschirmarbeit und Müdigkeit hervorgerufen werden können. Gerade bei leichten, gelegentlich auftretenden Beschwerden wirken Augentropfen mit Euphrasia wie HYLO FRESH® erfrischend und lindern unangenehme Reizungen am Auge.

Schritt 1



Vor dem Gebrauch Schutzkappe abnehmen.

Schritt 2



Flasche mit der Tropferspitze nach unten halten. Legen Sie den Daumen auf die Flaschenschulter, die anderen Finger auf den Flaschenboden.

Schritt 3



Stützen Sie die Hand mit der Flasche mit der anderen Hand leicht ab.

Schritt 4



Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen mit der anderen Hand das untere Augenlid leicht herab. Üben Sie kräftigen Druck auf den Flaschenboden aus und träufeln den Tropfen in den Bindehautsack. Dank des speziellen COMOD® Pumpsystems tritt genau 1 Tropfen aus. Schließen Sie das Auge langsam, um die Flüssigkeit auf der Augenoberfläche zu verteilen. Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort mit der Kappe verschließen.



BILDSCHIRMARBEIT

Beim konzentrierten Arbeiten am Monitor blinzeln wir deutlich weniger als üblich. Normalerweise benetzt der Lidschlag die Augen alle paar Sekunden mit Tränenflüssigkeit und erneuert den Schutzfilm. Geschieht dies bei der Bildschirmarbeit seltener, hat das trockene Augen mit Rötungen, Brennen und Juckreiz zur Folge. Schnelle Befeuchtung und Linderung bringt HYLO FRESH® mit Hyaluronsäure und Euphrasia.



GAMING

Beim Zocken werden die Augen stark gefordert. Um nicht nur dem Gegner, sondern auch trockenen Augen den Kampf anzusagen, fungiert HYLO® als „Official Eye Care Supplier“ deutscher eSport-Stars. Die Partnerschaft der deutschen Nummer 1 in der Augenbefeuchtung* mit SK Gaming klärt Gamer über die Belastungen beim Zocken auf und zeigt, wie die Augen einfach regeneriert und gepflegt werden können.

*Abverkauf Total (EH) der HYLO® Produktfamilie; IH Galaxy: APO Channel Monitor; S01K1: MAT 2020.12



AUF REISEN

So angenehm der Aufenthalt in klimatisierter Umgebung bei heißen Temperaturen sein mag: Die trockene, kühle Luft durch die Klimaanlage in Hotelzimmer, Auto, Zug oder Flieger kann den Tränenfilm beeinträchtigen: Die Augen beginnen zu brennen, sind gerötet oder fühlen sich müde an. Augentropfen, die für eine schnelle Befeuchtung und Erfrischung gestresster Augen sorgen, gehören deshalb in jede Reiseapotheke.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN:

Wie oft sollte ich HYLO FRESH® Augentropfen anwenden?

HYLO FRESH® eignet sich zur Anwendung bei gelegentlich auftretenden Beschwerden infolge trockener und gereizter Augen. Dosieren Sie die Augentropfen individuell nach Ihrer Befindlichkeit. Im Allgemeinen wird 3-mal täglich je 1 Tropfen HYLO FRESH® in das Unterlid jeden Auges getropft, bei stärkeren Beschwerden können die Augentropfen auch öfter am Tag angewendet werden. HYLO FRESH® ist auch für eine dauerhafte Anwendung geeignet. Bei anhaltenden Beschwerden empfiehlt es sich jedoch, einen Augenarzt aufzusuchen, um die genaue Ursache Ihrer Beschwerden abzuklären und ggf. die Therapie darauf abzustimmen.

Was ist als Kontaktlinsenträger bei der Anwendung von HYLO FRESH® zu beachten?

HYLO FRESH® ist sowohl mit weichen wie harten Kontaktlinsen verträglich. Nach dem Einsetzen der Kontaktlinsen empfiehlt es sich mit der Anwendung der Augentropfen ca. 30 Minuten zu warten. So lassen sich Unverträglichkeitsreaktionen vermeiden, die aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Kontaktlinsenpflegemitteln und HYLO FRESH® möglich sind.

Ist nach dem Eintropfen von HYLO FRESH® mit einer Sehbeeinträchtigung zu rechnen?

Nein, nach der Anwendung von HYLO FRESH® Augentropfen müssen Sie keine Beeinträchtigung des Sehvermögens befürchten.

Warum ist Gaming so anstrengend für die Augen?

Während wir normalerweise pro Minute 15- bis 20-mal blinzeln, sinkt die Quote beim Zocken, Streaming oder der intensiven Nutzung des Smartphones durch das Starren deutlich. Das Blinzeln bzw. der Lidschlag ist jedoch für die gleichmäßige Benetzung des Auges mit Tränenflüssigkeit verantwortlich. Aufgrund des verminderten Lidschlags wird die Augenoberfläche zunehmend trockener und gereizt. Dieses Phänomen wird als Gamer Eye (Computer Vision Syndrome) bezeichnet, das unangenehme Folgen haben kann: Brennen, Juckreiz und Müdigkeitserscheinungen mindern die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit, zudem können Probleme bei der Verarbeitung visueller, digitaler Informationen entstehen. Als Folge des angestregten Fokussierens können Kopfschmerzen auftreten. Um die volle Leistungsfähigkeit der Augen zu erhalten, sollten ambitionierte Gamer vorsorgen und auf die regelmäßige Befeuchtung der Augenoberfläche achten.

Ist HYLO FRESH® auch zur Anwendung bei Jugendlichen geeignet?

Ja, HYLO FRESH® Augentropfen sind besonders gut verträglich und können auch bei Jugendlichen angewendet werden. Bei häufig auftretenden oder länger anhaltenden Beschwerden sollte ein Augenarzt konsultiert werden.